

SURGINOX M – SURGINOX E



Privilégier l'essentiel

STERIS[®]



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Surginox M - Surginox E : deux tables d'opérations mobiles (manuel ou électrique) et jusqu'à 8 versions pour mieux répondre à vos exigences.

Surginox M

- **Mode manuel** : vous sélectionnez le mouvement sur le sélecteur [1]. Puis, vous pressez sur les pédales [2] pour obtenir le mouvement. Les réglages s'effectuent ainsi de manière rapide et intuitive.



Le sélecteur permet le réglage de la hauteur, la proclive/déclive ou l'inclinaison latérale.

Surginox E

- **Mode électrique** : vous sélectionnez le mouvement sur le sélecteur [1]. Puis, vous validez le mouvement via la télécommande [3] pour obtenir le mouvement. Les réglages s'effectuent ainsi rapidement, et sans aucun effort !

Le mode manuel de la table reste accessible et fonctionnel à tout moment, assurant ainsi le relais en cas de défaillance du mode électrique.

Billot optionnel

- Modulaire et réversible (2/3 - 1/3)
- **RADIOTRANSARENCE TOTALE** pour les amplificateurs de brillance ou autres matériels radiologiques
- Grâce à une manivelle située de chaque côté, la hauteur du billot est réglable jusqu'à 115 mm

Translation optionnelle de 250 mm

- Fournit un excellent accès au chirurgien pour tous types de procédures
- Permet un accès aux rayons X et à l'amplificateur de brillance



SATISFAIRE VOS BESOINS ESSENTIELS

• Robustesse

Matériaux de qualité supérieure et faciles à nettoyer : acier inoxydable, aluminium, ABS

• Fiabilité

Grâce à sa technologie éprouvée, la table est facile à faire fonctionner et à entretenir

• Ergonomie

Une conception qui offre un excellent accès à l'équipe chirurgicale (voies hautes et voies basses) pour un accès optimal aux commandes

• Polyvalence

Sa capacité de réglage permet de nombreuses applications ; des accessoires supplémentaires répondent aux exigences de spécialités chirurgicales diverses

• Mobilité exceptionnelle

Avec 4 grandes roulettes pivotantes

L'ENGAGEMENT DE STERIS

Le Centre d'Excellence Biens d'Equipements réunit sur son site à Bordeaux les équipes Marketing, R&D, fabrication et les ventes.

Les produits et services sont commercialisés non seulement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique Latine.

Une attention particulière est portée aux exigences précises de chaque intervention chirurgicale afin que nos produits puissent servir aux interventions les plus fréquentes et répondre aux attentes de nos clients.

STERIS PRÉSENTE SA NOUVELLE GAMME DE TABLES D'OPÉRATIONS SURGINOX

En plus de leurs performances, les tables Surginox M et Surginox E présentent un design élégant et témoignent d'une fabrication de premier choix. Tout cela fait des tables Surginox les nouvelles références du marché, à un prix très compétitif.



COUSSINS À MÉMOIRE DE FORME

- Doux
- Faciles à nettoyer



SOUFFLET MOULÉ ET ÉTANCHE

Protège de l'infiltration de liquides corporels et d'agents de décontamination.



SUPPORT JAMBES POLYVALENT

Jambières séparées pour chirurgie mini-invasive, transformables en plaque jambes.



ARTICULATION ASSISTÉE DU DOSSIER ARTICULÉ

Permet une manipulation très facile.

Structure du plateau et de la colonne en **ACIER INOXYDABLE**.

SOCLE PARFAITEMENT ACCESSIBLE

La forme compacte de l'embase facilite l'accès à l'équipe chirurgicale.



Surginox M et Surginox E sont disponibles en :

- Version basse : 600 mm - 950 mm
- Version haute : 700 mm - 1050 mm

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE

rapides et aisés des extensions.



Le socle, le plateau et la colonne sont conçus pour être extrêmement stables. Ils permettent de supporter un patient pesant jusqu'à 150 kg.

MOBILITÉ EXCEPTIONNELLE

Quatre grandes roulettes pivotantes garantissent une manœuvrabilité excellente dans toutes les directions, même avec le patient allongé sur la table. Elles permettent un blocage sûr pour garantir une immobilité parfaite pendant les opérations chirurgicales. Blocage directionnel de deux roulettes pour les déplacements rectilignes.



POLYVALENTE POUR TOUTES LES CHIRURGIES

Il suffit de peu d'extensions pour pratiquer toutes les chirurgies :

- Générale
- Cardiovasculaire
- Neurologique
- Reconstructrice
- Urologique et gynécologique
- Viscérale
- Ophtalmologique
- Orthopédique et traumatologique

Cette souplesse garantit :

- Un accès optimal autour du patient pour les équipes chirurgicales
- Une utilisation aisée des équipements auxiliaires comme l'amplificateur de brillance, microscope...
- Un excellent positionnement pour toutes les chirurgies

Gynécologie

Position de lithotomie grâce aux supports Goepel.



Digestive



Jambières en abduction

Viscérale



CHIRURGIE MINI-INVASIVE

La version basse (600 mm) assure un excellent accès au chirurgien pour les procédures de chirurgies mini-invasives.

Urologie



Position latérale du patient pour la néphrectomie rendue possible grâce à un billot optionnel entièrement radiotransparent.

Chirurgie générale



ORL / Ophtalmologie / Neurochirurgie

La position basse (600 mm) autorise un meilleur accès et un confort optimal pour le chirurgien pendant l'utilisation du microscope.




Utilisation d'une tête à cheval et d'un système de traction.

Cardio thoracique

L'utilisation du billot radiotransparent est idéale pour les interventions de chirurgie cardiaque et rénale.

RADIOTRANSARENCE TOTALE pour les amplificateurs de brillance ou autres matériels radiologiques.

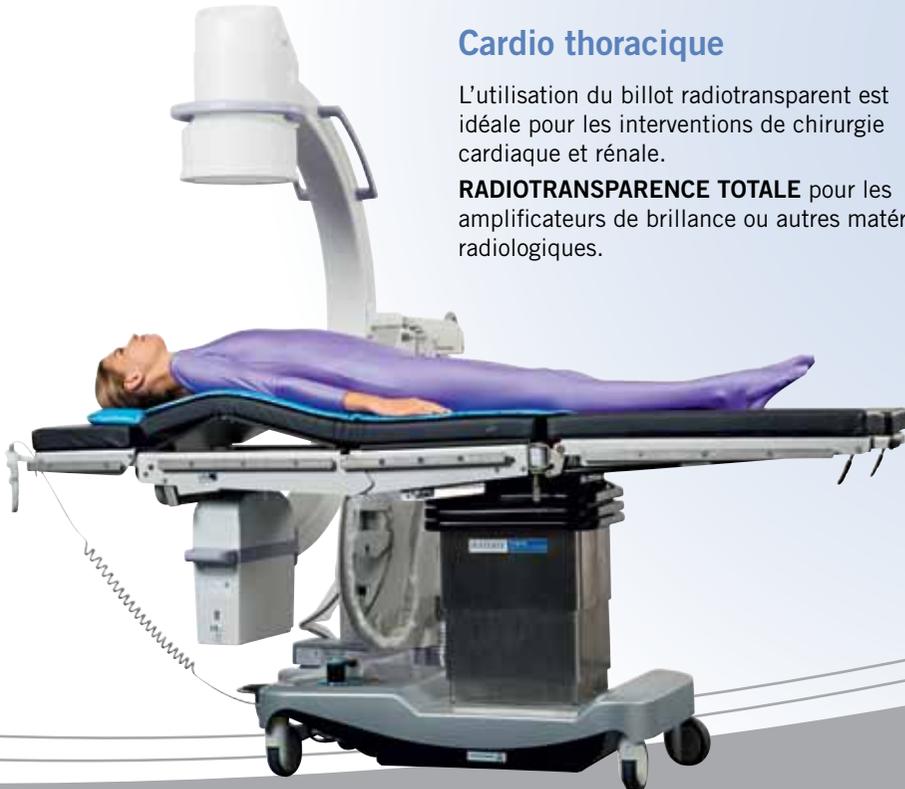

Chirurgie reconstructrice



POLYVALENTE POUR TOUTES LES CHIRURGIES

Orthopédie

Surginox M et Surginox E sont aussi les partenaires de l'orthopédiste. Elles sont conçues pour couvrir les principales applications de cette spécialité. De la traumatologie des membres inférieurs, en passant par la chirurgie du genou et de la main, elles vous permettent de mettre en œuvre les techniques chirurgicales les plus complexes... tout en restant simples.

Chirurgie du bras et de la main

Avec accessoires dédiés et radiotransparents (TAB260CF).



Arthroscopie du genou

L'utilisation du support d'arthroscopie assure le confort et la sécurité du patient.



CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE DES MEMBRES INFÉRIEURS



Traction fémorale avec système de traction transcondylienne. Excellent accès de l'amplificateur de brillance.



Utilisation de l'appareillage orthopédique **ORT5000C** composé de :

- Support pelvien,
- Barre de contre-extension orientable,
- 2 barres de traction télescopiques avec tracteur.

Une mobilité exceptionnelle

Sa grande mobilité autorise les déplacements à l'extérieur du bloc.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques électriques (Surginox E)

Secteur	100-240 VAC~50-60Hz 420 VA max 1 phase
Protection	Classe 1 type B
Batteries	2x NP12 - 12FR ; 12V, 12Ah
Autonomie	55 interventions env.
Témoin de charge	Led socle
Étanchéité aux liquides	IPX4


Caractéristiques mécaniques

Montée / descente : Version basse Version haute	600 mm / 950 mm (course 350 mm) 700 mm / 1050 mm (course 350 mm)
Inclinaison latérale gauche / droite	20° / 20°
Déclive / proclive	+30° / -30°
Montée dossier / descente dossier	+80° / -45°
Billot réversible 1/3-2/3 (optionnel)	115 mm
Translation mécanique (option)	250 mm
Longueur du plateau	1034 mm (2134 mm avec tête et jambières séparées)
Largeur du plateau	520 mm (560 mm rails compris)
Poids de la table (avec tête+jambière)	200 kg (tête 5,6 kg, paire de jambières 14 kg)
Poids maximum patient + accessoires	150 kg
Dimensions du socle	1015 x 560 mm (hors pédales)
Garde au sol / diamètre des roues	48 mm / 125 mm


Surginox est proposée en 4 modèles différents avec ou sans variante

	Surginox-M		Surginox-E	
	Version basse	Version Haute	Version basse	Version Haute
Basique	ST-4080AML	ST-4080EAMH	ST-4080AEL	ST-4080AEH
Option translation mécanique et billot réversible 1/3-2/3	ST-4080DML	ST-4080FDMH	ST-4080DEL	ST-4080DEH


Débattements des mouvements

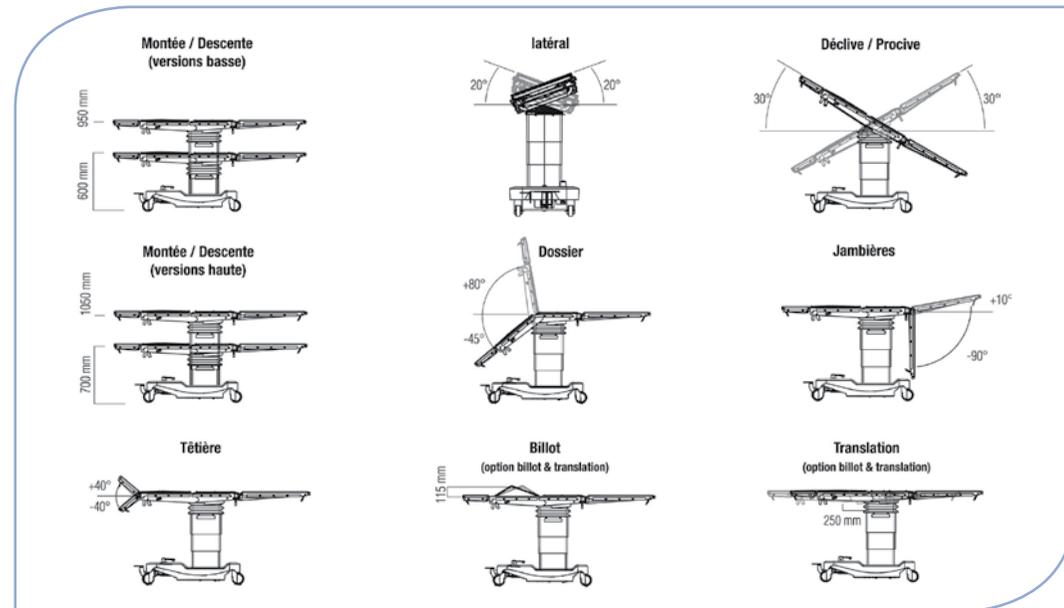

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

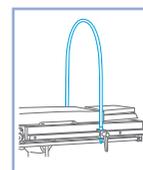


Arceau
d'Anesthésie
Souple
TAB 005

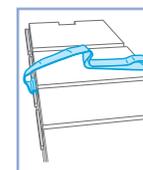

Sangle
Devon
TAB 213




Fixe cassette
Rayon X
TAB 733

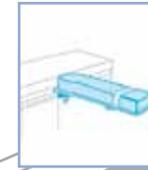


Appui-bras
simple
TAB 071D



Bride
automatique
à crans pour
rails diamètres
16, 18 &
20 mm
x 2 unités
TAB 741

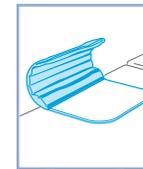

Gouttière
de Quenu
TAB 270

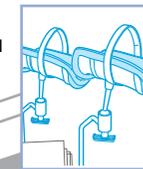

Paire de
porte-jambes
Goepel
simples
TAB 376A



Bride standard
pour rails
(25 x 10 mm
& 30 x 8 mm)
TAB 420



Et encore plus d'accessoires sur
www.steris-lesindispensables.com



STERIS, PARTENAIRE DU BLOC OPÉRATOIRE DEPUIS 70 ANS

Fort de 6000 collaborateurs dans le monde, STERIS est un acteur majeur de la santé. Partenaire de plus de 25 000 clients dans plus de 80 pays, STERIS intervient sur l'ensemble du bloc opératoire et propose une offre globale : tables d'opérations, éclairages opératoires, bras de distribution et systèmes d'intégration. STERIS, ce sont aussi des technologies au service de la prévention des infections, à travers STERIS IPT (Infection Prevention Technology) : laveurs, désinfecteurs, stérilisateurs et consommables.



STERIS OFFICES WORLDWIDE

Belgium	+ 32 3 304 95 44	Latin America	+ 1305 442 9822
Canada	+ 905 677 0863	Malaysia	+ 60 3 7954 9822
China	+ 86 21 6340 6363	Russia	+ 7 499 737 7733
France	+ 33 (0)5 56 93 94 94	Singapore	+ 65 68 41 7677
India	+ 91 33 2367 5150	Spain	+ 34 91 658 5920
Korea	+ 82 2 527 1517		

STERIS®



STERIS

116 Avenue Magudas
33185 Le Haillan (Bordeaux) - France
Phone : + 33 (0)5 56 93 94 94
Fax : + 33 (0)5 56 93 94 95
E-mail : contact_sst@steris.com
www.steris-st.fr
www.steris-lesindispensables.com

STERIS Corporation

5960 Heisley Road - Mentor,
OH 44060-1834 - USA
Phone : + 1 440-354-2600

STERIS N.V. / S.A.

Kievitplein 20C/12
2018 Antwerpen - BELGIUM
Tel : +32 3 304 95 44
Fax : +32 3 304 96 44